

Instrucciones:

1º- Este documento debe imprimirse. Nunca leer en el ordenador.

2º- Sujetar este papel en las manos y leer con sus gafas, con las que mejor lee (si no usa, gafas, léalo sin gafas).

3º- Empezar a leer por las letras mas grandes.

4º- Anote, de la ultima frase leída con claridad, el numero rojo que hay al final de la frase.

5º- Ahora anote el numero numero rojo que hay junto a la frase que le gustaria leer y no puede leer.

"He leído la frase que tiene el numero rojo.....
y me gustaría poder leer la que tiene el numero rojo....."

Haga la resta entre esos dos numeros rojos (el que lee y el que quiere leer).

Por ejemplo si leyó hasta el numero 8 y le gustaria leer hasta el 1, el resultado será: 8 menos 1 = $8-1 = 7$

Conclusión:

Cualquier lupa de clase 7 o superior, le permitirá leer lo que Ud. quiere.

Vea en la web, que lupas tienen ese numero de Clase(7), o superior (8,9...)

Voy ahora 10

Es de noche 9

Puedo oír bien 8

Paseo mucho 7

Reciclo pilas 6


Que flor tan aromática 5

El río es sinuoso 4

Hace frío en la casa 3

La noche es larga si no tengo sueño 2

El calor del verano se debe al sol que se acerca a la tierra 1

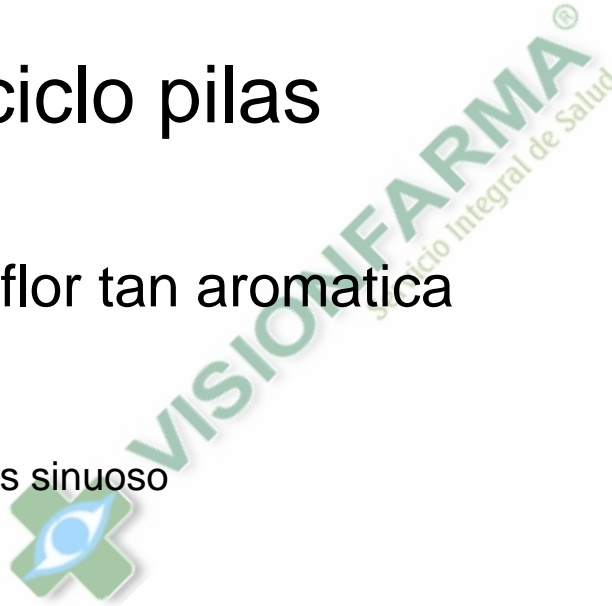

Recomendaciones:

Las lupas con pantalla pequeña le permitirán leer menos letras juntas. Para leer las frases deberá ir moviendo la lupa por encima de las letras.

Al principio del uso de la lupa, deberá ir despacio, leyendo letra a letra, y en unas semanas de practica diaria, aumentara su velocidad de lectura. Ocorre lo mismo que con cualquier cosa que se aprende a usar, primero se aprende con precaución y luego cuando se tiene destreza, se aumenta la velocidad.

Para facilitar el aprendizaje, una vez conocida la Clase, elija la de mayor pantalla para una lectura más fácil.

Nuestro sistema esta garantizado:
verá con la lupa.

Si no es así devuelvanos la lupa tal y como se le entregó y le abonaremos el importe de la lupa (excepto gastos de envío).

